

Produktdatenblatt / Product Data Sheet


Wilfried Rosbach GmbH

**FFP 2**

**ATEMSCHUTZMASKE**

▪ **premium plus** ▪

Nicht steriles Einmal-Produkt in **Schalenform** mit 2 latexfreien Gummibändern und formbarer Nasenklammer mit weichem Nasenpolster, für Brillenträger geeignet

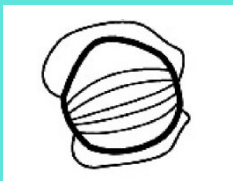

**FFP 2**

**RESPIRATOR MASK**

▪ **premium plus** ▪

Non sterile disposable product in **cone style** with 2 latex-free elastic straps and an adjustable nose clip with soft nose cushion, suitable for people wearing glasses

**Verwendungszweck & -bereich**  
*purpose & application area*

- Abdeckung von Nase und Mund
- **Schutz gegen ungiftige feste und flüssige Aerosole bis zum 12-fachen des Grenzwertes MAK/TRK/AGW**
- Industrie, Pharmaindustrie, Arztpraxen, Krankenhäuser, Reinigungs- u. Hygienebereiche, Nahrungsmittelverarbeitung, Haus + Garten, Landwirtschaft, Bauwesen

- for covering nose and mouth
- **protection against non-toxic solid and liquid aerosols in concentration up to 12 times MAC/OEL/TLV**
- industry, pharmaceutical industry, doctors office, hospital, cleaning + hygiene sectors, food processing sector, house + garden, agriculture building industry

**Richtlinien + Klassifizierung/Kategorisierung & mitgeltende Normen & Zertifikate**  
*Directives + classification/categorization & applied standards & certificates*

- CE gemäß PSA – Richtlinie 89/686/EWG – Kat. 3 Produkt
- **ISO EN 149:2001 + A1:2009**
- INSPEC International Ltd., England (Notified Body no. 0194)

- CE acc. to PPE – Directive 89/686/EEC – Cat. 3 product
- **ISO EN 149:2001 + A1:2009**
- INSPEC International Ltd., England (Notified Body no. 0194)

**Mitgeltende Qualitätssicherung**  
*applied quality assurance*

- ISO EN 9001:2015

- ISO EN 9001:2015

**Gebrauchshinweise**  
*directions of use*

- **Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung und Warnhinweise auf der Produktverpackung! Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen, Warnhinweise sowie Einsatzgrenzen dieses Produktes kann die Wirksamkeit der Maske verringern und zu schweren Erkrankungen oder Tod führen.**
- Um eine möglichst gute, eng anliegende Abdeckung zu erzielen, Nasenbügel der Gesichtsform anpassen
- Die Schutzwirkung der Atemschutzmaske ist nur bei richtiger Produktauswahl gewährleistet
- Bei sachgemäßer Anwendung durch qualifizierte Personen unbedenklich
- Nur unversehrte Artikel verwenden! Es ist vor und während des Gebrauchs auf Unversehrtheit des Artikels zu achten!
- Der Anwender ist gehalten die Arteikeleignung für die vorgesehenen Zwecke in eigener Verantwortung zu prüfen!

- **Please pay attention to the instructions of use and warnings on the product packaging. Disregarding these warnings, instructions and limitations of the use of this product could reduce the effectiveness of the mask and may result in sickness or death.**
- to achieve a good, close coverage, adjust nose bar to the face
- It is essential for the protection of your health to select your mask properly
- harmless, if used properly by qualified persons
- only use undamaged products! Attention to the integrity of the article must be paid before and during usage!
- the user is expected to prove the suitability of the product for its intended use at his own responsibility!

**Verwendungseinschränkungen**  
*restrictions of use*

- Diese Atemschutzmaske ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und ist nach Gebrauch zu entsorgen.
- Atemschutzmasken mit der Kennzeichnung „NR“ dürfen nicht über die Dauer einer Arbeitsschicht hinaus verwendet werden

- the mask is designed for single use only. Discard the mask after having used it.
- NR marked masks shall not be used for more than one shift.

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances  
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverständnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.  
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.


® care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany

**Produktdatenblatt / Product Data Sheet**

Wilfried Rosbach GmbH

<b>1. Lage</b> <i>1<sup>st</sup> layer</i>	· Material: Polypropylen-Spinnvlies · Gewicht: ≈ 30 g/m <sup>2</sup> (± 3 g/m <sup>2</sup> ) · Farbe: weiß	· material: non-woven polypropylene · weight: ≈ 30 gsm (± 3 gsm) · colour: white
<b>2. Lage</b> <i>2<sup>nd</sup> layer</i>	· Material: Polypropylen Filterfaser P2 · Gewicht: ≈ 50 g/m <sup>2</sup> (± 3 g/m <sup>2</sup> ) · Farbe: weiß	· material: polypropylene filter fibre P2 · weight: ≈ 50 gsm (± 3 gsm) · colour: white
<b>3. Lage</b> <i>3<sup>rd</sup> layer</i>	· Material: Terylen · Gewicht: ≈ 230 g/m <sup>2</sup> (± 3 g/m <sup>2</sup> ) · Farbe: weiß	· material: terylene · weight: ≈ 230 gsm (± 3 gsm) · colour: white
<b>Gummibänder</b> <i>elastic straps</i>	· Material: Baumwolle mit Lycra · Länge: ≈ 32 cm (± 3 cm) · Breite: ≈ 6 mm (± 1 mm) · Farbe: white	· material: cotton with lycra · length: ≈ 32 cm (± 3 cm) · width: ≈ 6 mm (± 1 mm) · colour: weiß
<b>Nasenklammer</b> <i>nose clip</i>	· Material: Aluminium · Länge: ≈ 8,5 cm (± 1 cm) · Breite: ≈ 7 mm (± 1 mm)	· material: aluminium · length: ≈ 8.5 cm (± 1 cm) · width: ≈ 7 mm (± 1 mm)
<b>Nasenpolster</b> <i>nose cushion</i>	· Material: Schaumstoff (Polyurethan) · Länge: ≈ 9 cm (± 1 cm) · Breite: ≈ 9 mm (± 1 mm) · Stärke: ≈ 5 mm (± 0,5 mm) · Farbe: grau	· material: sponge (polyurethane) · length: ≈ 9 cm (± 1 cm) · width: ≈ 9 mm (± 1 mm) · thickness: ≈ 5 mm (± 0.5 mm) · colour: grey
<b>Materialbeschaffenheit</b> <i>material characteristics</i>	· hautfreundlich, nicht reizend, leicht	· skin-friendly, non-irritating, light
<b>Allergiehinweis</b> <i>allergy information</i>	· latexfrei, glasfaserfrei, silikonfrei	· free from latex + glass fiber + silicone
<b>Kennzeichnung</b> <i>marking</i>	· individuelle Lot Nr. zwecks Rückverfolgbarkeit	· individual lot no. for traceability
<b>Lagerung</b> <i>storage</i>	· Zu lagern in Originalverpackung in einem trockenen, schadstoff- und schmutzfreien Bereich, bei einer Raumtemperatur zwischen -2 °C und +40 °C und einer relativen Luftfeuchte von weniger als 70%	· store in original packing in a clean, dry, non-contaminated area under the following conditions: i.e. temperature between -2 °C and +40 °C and a relative humidity less than 70 %
<b>Mindesthaltbarkeit</b> <i>minimum shelf-life</i>	· 5 Jahre ab Produktionsdatum bei korrekter Lagerung	· 5 years from production date if stored correctly

<b>Unterverpackung</b> <i>subpackaging</i>	20 St. / Spenderbox	20 pcs. / dispenser box
<b>Versandeinheit (1 Karton)</b> <i>shipping unit (1 carton)</i>	400 St. / Karton (20 x 20 St.)	400 pcs. / carton (20 x 20 pcs.)

	<b>SCHALENFORM</b> <b>CONE STYLE</b>
<b>Größe</b> <i>size</i>	<b>Weiß</b> <b>white</b>
<b>Standard</b>	REF 16 06 2509

Den Zahlenangaben liegen die üblichen Toleranzen zugrunde / figures are subject to usual tolerances  
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse. Sie sind keine garantierte Zusicherung von Produkteigenschaften und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. / All information to the best of our current knowledge. They do not guarantee a warranted quality and are no foundation for a contractual relationship.  
Eingabefehler und Irrtümer vorbehalten. / Errors excepted.

© care&serve logos are a registered trade mark of: WIROS – Wilfried Rosbach GmbH – Karl-Arnold-Str.5 – 47877 Willich/Germany